

作業報告書

2018 年 4 月 23 日

国立大学法人岡山大学病院

様

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいませようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	MAGNETOM Skyra	作業番号	728200806010
装置シリアル番号	46197	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-190034	作業状況	完了
技術ID番号	732-40042081-MR01	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

訪問理由/システム状況・現象等
定期点検(3/4回目)

作業内容

点検報告書に従い実施しました。システムチューンアップ実施。温湿度測定。受信コイルチェック。バックアップ取得。冷却水加圧実施。テーブル清掃実施。現在特に異常なく動作しています。
その他、クエンチボタンの定期動作試験を行いました。正常に動作しています。
作業後、システムOFF/ON及びテストスキャンを行い動作確認しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/04/23	杵川 博哉	71026753	17:45	5.50		5.50	

使用部品・諸経費

(注)部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

大野

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2018 年 7 月 13 日

国立大学法人岡山大学病院 様

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	MAGNETOM Skyra	作業番号	728200821634
装置シリアル番号	46197	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-190034	作業状況	完了
技術ID番号	732-40042081-MR01	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

訪問理由/システム状況・現象等

- ①定期点検4/4回目（安全点検1/1回目）
- ②UI: MR025/17/R Security Delivery SD05 999004032747

作業内容

①点検報告書に従い実施しました。システムチューンアップ実施。温湿度測定。受信コイルチェック。バックアップ取得。現在特に異常なく動作しています。
 ②ドイツ指示によりアップデートを実施しています。
 UI: MR025/17/R Security Delivery SD05 999004032747 Windowsのセキュリティアップデートになります。
 その他Body18コイル(シリアル番号1532)の一部エレメントのSN値が下がっていました。新しくコイル手配し後日交換にお伺いします。
 作業後、システムOFF/ON及びテストスキャン行い動作確認しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/07/13	杵川 博哉	71026753	17:30	6.50		6.50	

使用部品・諸経費

(注)部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

大野

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2018年10月26日

国立大学法人岡山大学病院 様

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	Magnetom Skyra	作業番号	728200852177 / 1
装置シリアル番号	45292	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108275	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR05	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

サービス・作業内容

<p>訪問理由/システム状況・現象等 定期点検 第1回(年4回)</p>
<p>作業内容 点検手順書に従い、定期点検作業を実施しました。詳細は別紙点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認しました。</p> <p>*液体ヘリウムレベル:72.5% *マグネットシールド温度:50.0K/57.0K/39.5K *内圧:15.51psiA *コンプレッサガス圧:22-23Bar *2次冷却水(Return/Supply):1.02Bar/4.32Bar</p> <p>【特記事項】 ①1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃しました。 ②目視によるチラー簡易点検を実施しました。外観上の異常はございません。 ③そのほか各種コイル性能チェック、冷却水補充、BackUp作成等を実施しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/10/26	多胡 大地	71001511	18:00	5.50	0.00	5.50	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

大野

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

点検報告書

作業内容

点検回数 : 年4回 - 第1回	作業実施日: 2018年10月26日	報告書番号: 1
作業実施報告者 : 多胡 大地		
作業結果 : 下記の予防点検の項目を実施しました。装置に異常ございません		
LHe72.5% 50KL 50.0K 50KB 57.0K CHT 39.5K 15.51psiA PHAP 0.89W ERDU battery 23.53V 二次冷水圧力S4.32bar R1.02bar リザーブ圧3.0bar→5.4bar F-70 22-23bar DB 70%		
<ul style="list-style-type: none">・1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃しました。・目視によるテラー簡易点検を実施しました。外観上の異常はございません。・そのほか各種コイル性能チェック、冷却水補充、BackUp作成等を実施しました。		

点検回数 : 年4回 - 第2回	作業実施日: 2019年1月28日	報告書番号: 1
作業実施報告者 : 多胡 大地		
作業結果 : 下記の予防点検の項目を実施しました。装置に異常ございません		
LHe72.5% 50KL 49.3K 50KB 54.9K CHT 39.5K 15.51psiA PHAP 0.67W ERDU battery 23.53V 二次冷水圧力S4.30bar R1.00bar リザーブ圧2.5bar→5.0bar F-70 22-23bar DB 71%		
<ul style="list-style-type: none">・1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃しました。・有資格者によるテラー定期点検を実施しました。動作良好です。・UI(MR020/18/R ACS fan capacitors)実施、ACSファンユニット内のキャパシタを交換しました。		

点検回数 : 年4回 - 第3回	作業実施日:	報告書番号:
作業実施報告者 :		
作業結果 :		

点検回数 : 年4回 - 第4回	作業実施日:	報告書番号:
作業実施報告者 :		
作業結果 :		