

SIEMENS

SOMATOM Definition Flash

CT

定期点検報告書

顧客名： 国立大学法人岡山大学病院 様

装置名： SOMATOM Definition Flash

ID : 732-40018020-CT02

シリアル番号： 73347

点検回数： 年 2 回

作業表 No.	728200863638	作業実施日:	2018年 12月 18日
作業表 No.	728200928279	作業実施日:	2019年 6月 19日

お客様のご検収は作業票にお願い致します。

点検は点検手順書 C2-047.832.01.01.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。



点検報告書

作業内容

点検回数 : 年2回 - 第1回	作業実施日: 2018年12月18日	報告書番号: 4
作業実施報告者 : 川原 直多可		
作業結果 : 下記点検項目に従い点検実施致しました。特に異常は確認されませんでした。 株式会社ダイキンアプライドシステムズにて、チラーの点検を実施いたしました。 こちらも異常ありません。		
エックス線管使用量		
A側 202397秒 2018年3月8日使用開始		
B側 36149秒 2017年8月15日使用開始		

点検回数 : 年2回 - 第2回	作業実施日: 2019年6月19日	報告書番号: 1
作業実施報告者 : 川原 直多可		
作業結果 : 下記点検項目に従い点検実施致しました。特に異常は確認されませんでした。 朝の1、2例撮影時、寝台のINGOUT動作で音がる件は確認できませんでした。グリスアップを実施しましたので経過観察をお願いします。 株式会社ダイキンアプライドシステムズにて、チラーの点検を実施いたしました。 こちらも異常ありません。		
エックス線管使用量		
A側 324172秒 2018年3月8日使用開始		
B側 48161秒 2017年8月15日使用開始		

2019 年 12 月 10 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
 下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	SOMATOM Definition Flash	作業番号	728200928280 / 1
シリアル番号	73347	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108270	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-CT02	契約区分	契約あり
		報告者	梅津 孝幸

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】 年2回第1回目保守点検作業</p> <p>A管球の使用量 449400秒 使用開始日 2018年3月8日 B管球の使用量 60451秒 使用開始日 2017年8月15日</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】 点検報告書に基づき、作業を実施いたしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部安全機能点検実施。ガントリー内部、スリップリング、その他各部清掃実施。 ・PDAフィルター、EMCブラシ交換いたしました。 ・IRS/ICSフィルター清掃、ガントリー内部清掃・点検いたしました。 ・イメージクオリティチェックにて問題ございませんでした。 <p>その他、電源OFF/ON後にテスト撮影にて問題ございませんでした。</p>

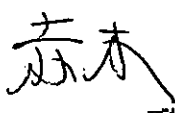
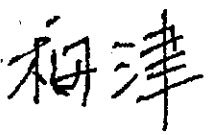
作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/12/10	梅津 孝幸	71001897	18:00	4.50	0.00	4.50	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10161717 filter-mat	10161717	1	
10161717 filter-mat	10161717	1	
10161804 EMC brush	10161804	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンラインサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>ご担当者様</p> </div>	<p>弊社確認</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>梅津 孝幸</p> <p>2019年12月10日</p> </div>
---	--

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

SOMATOM Definition Flash

CT

定期点検報告書

顧客名: 国立大学法人岡山大学病院 様

装置名: SOMATOM Definition Flash

ID : 732-40018020-CT02 シリアル番号: 73347

点検回数: 年 2 回

作業表 No.	728200928280	作業実施日:	2019年 12月 10日
作業表 No.		作業実施日:	

お客様のご検収は作業票にお願い致します。

点検は点検手順書 C2-030.831.02.15.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。

Fujii
Yuki

デジタル署名者 Fujii Yuki
DN: cn=Fujii Yuki,
o=Siemens,
email=yuki.fujii@siemens-
healthineers.com
日付: 2019.12.20 11:19:55
+09'00'

点検報告書

作業内容

点検回数 : 年2回 - 第1回	作業実施日: 2019年12月10日	報告書番号: 1
作業実施報告者 : 梅津 孝幸		
作業結果 : 本作業報告書に基づき作業を実施いたしました。 各項目を作業実施に当たり、異常はありませんでした。 点検作業実施後、クオリティチェックにて問題が無いことを確認いたしました。 テストスキャンにおいても問題ございませんでした。		
A管球の使用量:449400秒 使用開始日:2018年3月8日 B管球の使用量:60451秒 使用開始日:2017年8月15日		

点検回数 : 年2回 - 第2回	作業実施日:	報告書番号:
作業実施報告者 :		
作業結果 :		