

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センター内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925			
お客様ID 61158290000-113	受付番号 4996650	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4090320101

装置名 SSA-790A	設置室 ■⑧超音波センター	据付日 2011年1月24日
-----------------	------------------	-------------------

ご依頼内容 保守点検2020年03月/定期点検2020年03月		受付日 2019年8月1日		作業内容 定期点検マニュアル2Y730-022JAに基き保守点検作業実施いたしました 特に異常ありませんでした 以上で作業完了といたします	
作業開始・終了時間					
開始	2020年3月10日15時30分				
終了	2020年3月10日17時30分				
時間内	時間外	往復	合計		
2	0	1	3	完了	

ユニット SSA-790A	製造番号 99J10Z6108	作業担当者 行友大基 他0名
------------------	--------------------	-------------------

使用部品			数量
1	JELLY-HOLDER	図番 3M08-32110*A	2
2	PROBE-HOLDER	図番 3M08-32115*A	6
3	PROBE-HOLDER	図番 3M08-32119	1
4	PROBE-HOLDER	図番 3M08-32120	1
5	BATTERY PACK	図番 BSC30-0520	1

ご所属

ご署名

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号	01129437
------	----------

畫片與戲院之競爭
畫片與戲院之競爭

(SR番号:) (MC:)		(設置室名: 検査室7)		()		(口保証期間内、口保守契約、口その他)		御得意様承認印	
御得意様名 (コード: 6115229-113)		岡山大学病院		2019 年 8 月 1 日		2020 年 3 月 10 日		30	
装置名 S5A-790A		据付日 11 年 1 月 24 日		S/N 99J1026108		Ver V5.2/R860		検査実施者 行友 大基	
項目		点検内容		処置		結果		備考	
自己点検		Diagnostics(TX,他)				✓		0.055 Ω	
自己点検		Diagnostics(操作パネル)				✓		0.089 Ω	
自己点検		プリセットのバックアップ		サイトホックアップ		✓		- Ω / - Ω / - Ω	
機能		時刻・日付の表示				✓		正常/単一故障	
機能		基本動作				✓		192.3 μA / 318.6 μA	
機能		トラックボールの動作				✓		1.2 / μA / 3.2 μA	
機能		ファンの動作				✓		1.2 / μA / 3.2 μA	
機能		周辺機器の確認				✓		10 μA 50 μA 以下	
機能		観察用モニタの確認 (CRT or LCD)				✓		500 μA / 1000 μA 以下	
機能		参考信号ユニットの動作				✓		100 μA / 500 μA 以下	
機能		DICOM動作の確認				✓		100 μA / 500 μA 以下	
機能		キヤスタ				✓		10 μA / 50 μA 以下	
機能		キヤスタ取付部		I		✓		S/N: F00185510	
機能		モニタ取付け機構 (CRT or LCD)		I		✓		4620 H	
機能		操作パネル		I		✓		S/N: 10A102371	
機能		ハンドルの取付け機構		I		✓		112 H	
機能		周辺機器の取付け機構		I		✓		307 H	
機能		その他機構部品		I		✓		63	
機能		ケーブル接続		I		✓		S/N: 99A1024853	
機能		フロアの外観確認		I		✓		99A1393351	
機能		設置内部/ファン		OL		CL		307 H	
機能		フィルタ		OL		CL		63	
機能		カバー/操作パネル		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		タッチパネル		OL		CL		99A132554E	
機能		観察用モニタ (CRT or LCD)		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		フロア/フロアホルダ/ゼリーホルダ		OL		CL		99A132554E	
機能		ハッティバツカ/倍速充電器/		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		フロア切替器/参考信号ユニット		OL		CL		99A132554E	
機能		ケーブル/コード類		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		白黒プリンタ 型式名 (P95P)		OL		CL		99A132554E	
機能		カラープリンタ 型式名 (CP900P)		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		レコーダ 型式名 (BD-X201H)		OL		CL		99A132554E	
機能		定期交換部品		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		700-770ホルダ		OL		CL		99A132554E	
機能		ゼリーホルダ		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		ドットリ		OL		CL		99A132554E	
機能		3M08-32115XA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		3M08-32110XA		OL		CL		99A132554E	
機能		BSC30-0520		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		測定器1		OL		CL		99A132554E	
機能		測定器2		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		72-271LNo		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		S/N: 99A171632	
機能		2Y730-022JA		OL		CL		99A132554E	

記録結果(V:異常なし、C:確認、CL:清掃、I:目視点検、A:調整、R:交換、N:特記事項参照、/ :適用外)

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業（納品）を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センター内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925			
お客様ID 61158290000-113	受付番号 4628299	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC3467390106

装置名 SSA-790A	設置室 ■⑧超音波センター	据付日 2011年1月24日
-----------------	------------------	-------------------

ご依頼内容 保守点検2019年03月/定期点検2019年03月		受付日 2018年8月1日		作業内容 保守点検作業実施 腹部用プローブPVT-375BT隙間確認、後日交換修理予定いたします その他特に異常ありませんでした 以上で作業完了といたします	
作業開始・終了時間					
開始	2019年3月19日16時00分				
終了	2019年3月19日18時30分				
時間内	時間外	往復	合計		
1.5	1	0	2.5		
完了					

ユニット SSA-790A	製造番号 99J10Z6108	作業担当者 行友大基 他0名
------------------	--------------------	-------------------

使用部品		数量
1	別紙の通り、以下余白	
2		
3		
4		
5		

ご所属

ご署名

戸田 由香

お客様へ（留意事項のご説明）

- ※本作業（納品）に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報（以下「お客様情報」といいます）につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品（作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品）につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	00846840
------	----------

作業報告書 (別紙)

	使用部品	図番	数量
1	JELLY-HOLDER	3M08-32110*A	1
2	PROBE-HOLDER	3M08-32115*A	6
3	PROBE-HOLDER	3M08-32119	1
4	PROBE-HOLDER	3M08-32120	1
5	AC CABLE(100V)	BM31-2587 1	1
6	PSW02+BALL	BSM34-1630-03*C	1
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

お客様へ (留意事項のご説明)

- ※本作業 (納品) に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報 (以下「お客様情報」といいます) につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品 (作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品) につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

A. 御得意様用(報告)

超音波画像診断装置 定期点検報告書

(SR番号: 4628299) (MC: 3467390106)

御得意様名 (コード: 6115829-113) (設置室名: ⑧ 超音波229-)

岡山大学病院

装置名 SSA-790A 据付日 2011年1月4日 S/N 993102668 Ver 5.21R860

(口保証期間内、口保守契約、口その他)

契約期間 2018年8月1日 点検実施日 2019年3月19日

点検実施者 佐々木 大基

御得意様承認印

印

項目	点検内容	処置	結果	備考	項目	点検内容	記録	結果	備考
自己診断	Diagnostics (TX, 他)		✓	Pass	電気的安全性	保護接地抵抗(保護接地端子~LCDモニター操作パネル)	0.055Ω	✓	0.1Ω以下
	Diagnostics (操作パネル)		✓			保護接地抵抗(GPプラグ接地~LCDモニター操作パネル)	0.084Ω	✓	0.2Ω以下
	リセットのバックアップ		✓			保護接地抵抗(LCDモニター/プリンタ端子 倍速充電器 ~ GPプラグ接地)	— Ω / — Ω / — Ω	—	0.2Ω以下 (Viamoのみ)
機能	時刻・日付の表示		A	1/16		接地漏れ電流	190.1μA / 327.9μA	✓	500μA / 1000μA以下
	基本動作		✓			接触電流: 外装一接地間	1.50μA / 189.2μA	✓	100μA / 500μA以下
	トラックボールの動作		✓			患者漏れ電流AC: 患者一大地	1.16μA / 5.50μA	✓	100μA / 500μA以下
	ファン動作		✓			患者漏れ電流DC: 患者一大地	— μA / — μA	✓	10μA / 50μA以下
	周辺機器の確認		✓			患者漏れ電流: F形装着手部	— μA / — μA	✓	—
	観察用モニタの確認 (GRT or LOD)		✓			患者測定電流AC	— μA / — μA	✓	100μA / 500μA以下
	参考信号ユニットの動作		—			患者測定電流DC	— μA / — μA	—	10μA / 50μA以下
	DICOM動作の確認		✓					—	—
機械的安全性	キヤスタ	I	✓		ファントムデータの確認・画像の記録	方位・距離 (型式: PVT-375BT)		✓	S/N: FDA1626387
	キヤスタ取付部	I	✓			空間分解能	PVT-382BT	✓	99A1024865
	モニタ取付け機構 (GRT or LOD)	I	✓			ペネトレーション		✓	
	操作パネル	I	✓			スペックル/コントラスト		✓	
	ハンドルの取付け機構	I	✓			画像の記録		✓	4220H / 287 H
	周辺機器の取付け機構	I	✓			方位・距離 (型式: PVT-674BT)		✓	S/N: 99A1393357
	その他機構部品	I	✓			空間分解能	PLT-1204BT	✓	99A1716374
	ケーブル接続	I	✓			ペネトレーション		✓	
	ケーブル検査	I	✓			スペックル/コントラスト		✓	
	フロープの外観確認	I	✓			画像の記録		✓	84H / 41 H
清掃	装置内部/ファン	CL	CL			方位・距離 (型式: PLT-609AD)		—	S/N: 99A1325588
	フィルタ	CL	CL			空間分解能		—	
	カバー/操作パネル	CL	CL			ペネトレーション		—	
	タッチパネル	CL	CL			スペックル/コントラスト		—	
	観察用モニタ (GRT or LOD)	CL	CL			画像の記録		—	
	フロープ/フローホルダ/ゼリーホルダ	CL	CL			方位・距離 (型式: PVT-704AT)		✓	S/N: TPA023668
	バックアップ/倍速充電器/	CL	CL			空間分解能		✓	
	フロープ/切替器/参考信号ユニット	CL	CL			ペネトレーション		✓	
	ケーブル・コード類	CL	CL			スペックル/コントラスト		✓	
	白黒プリンタ 型式名 (P950)	CL	CL			画像の記録		✓	
	カラープリンタ 型式名 (CP9000)	CL	CL			方位・距離 (型式: PVT-704AT)		✓	
	レコーダ 型式名 (3D-X2011)	CL	CL			空間分解能		✓	
特記事項	PVT-375BT フロープ/スキャナ 後取換え済み。				定期交換部品	使用件数	1	39/90	2019年3月
	動作確認済み。その他異常ありません。				AC CABLE C100V	超音波ファントム	1	S/N: TM-150514-165	温度 22℃
					PSWAP2 + BALL	測定器1	1	管理No or SerNo: UKL-10022	
					DELLY-HOLDER	測定器2	6	管理No or SerNo: UKL-10024	
					PROBE-HOLDER		2	管理No or SerNo: 2Y730-0223A	
					PROBE-HOLDER				

記録・結果 (CL: 異常なし、C: 確認、CL: 清掃、I: 目視点検、A: 調整、R: 交換、N: 特記事項参照、/ : 適用外)

この定期点検報告書は、各装置の保守マニュアルに基づき作成されています

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センター内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925			
お客様ID 61158290000-097	受付番号 4926237	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4090250101
装置名 SSA-790A	設置室 中央検査10番	据付日 2007年12月25日			
ご依頼内容 保守点検2019年09月/定期点検2019年09月		作業内容 別紙点検報告書にもとづき保守点検作業実施			
作業開始・終了時間 開始 2019年9月25日16時00分 終了 2019年9月25日19時00分		完了			
時間内 1.5	時間外 1.5	往復 0.5	合計 3.5		
ユニット SSA-790A		製造番号 99C07X2982	作業担当者 木下 俊文 他0名		
使用部品					数量
1	JELLY-HOLDER	図番	3M08-32110*A		1
2	PROBE-HOLDER	図番	3M08-32115*A		6
3		図番			
4		図番			
5		図番			

ご所属

ご署名

検査

田羽知子

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号 01074792

A. 御得意様用(報告)

超音波画像診断装置 定期点検報告書

(SR番号: 4926236) (MC: 4090210101)		(口保証期間内、保守契約、口その他)		御得意様用(報告)	
御得意様名 (コード: 6115829-097) (設置室名: ①超音波検査室)		2019 年 8 月 1 日		2019 年 9 月 25 日	
2019 年 8 月 1 日		点検実施日		点検実施者	
2020 年 3 月 31 日		点検実施者		木下俊文	
装置名	SSA-700A	据付日	2019 年 01 月 24 日	S/N	993 026 0107
Ver	2.20 R32.1	様			
岡山大学病院					

項目	点検内容	処置	結果	備考	項目	点検内容	記録	結果	備考
自己診断	Diagnostics (TX,他)		✓		電気的安全性	保護接地抵抗(保護接地端子〜LCDモニタ/操作パネル)	0.027 Ω	✓	0.1Ω以下
	Diagnostics (操作パネル)		✓			保護接地抵抗(OPプラグ/接地)〜LCDモニタ/操作パネル	0.050 Ω	✓	0.2Ω以下
	リセットのバックアップ		✓			保護接地抵抗(LCDモニタ/プラグ/端子/保護装置)〜OPプラグ/接地	0.050 Ω	✓	0.2Ω以下(Viamoのみ)
機能	時刻・日付の表示		△			接地漏れ電流	219.2 μA / 321.9 μA	✓	500 μA/1000 μA以下
	基本動作		✓			接触電流: 外装一接地間	1 μA / 217.3 μA	✓	100 μA/500 μA以下
	トラックボールの動作		✓			患者漏れ電流AC: 患者一大地	1 μA / 4.46 μA	✓	100 μA/500 μA以下
	フアンの動作		✓			患者漏れ電流DC: 患者一大地	1 μA / 1 μA	✓	10 μA 50 μA以下
	周辺機器の確認		✓			患者漏れ電流: F形装置部	- / 14.19 μA	✓	- / 5000 μA以下
	観察用モニタの確認(GRT or LCD)		✓			患者測定電流AC	1 μA / 1 μA	✓	100 μA/500 μA以下
	参考番号ユニットの動作		✓			患者測定電流DC	1 μA / 1 μA	✓	10 μA/50 μA以下
	DICOM動作の確認		✓					✓	
機械的安全性	キャスタ	I	✓		ファントムデータの確認・画像の記録	方位・距離 (型式: PGT-25BT)		✓	S/N: FSC1832798
	キャスタ取付部	I	✓		空間分解能			✓	
	モニタ取付け機構(GRT or LCD)	I	✓		ベネトレーション			✓	
	操作パネル	I	✓		スベックル/コントラスト			✓	
	ハンドルの取付け機構	I	✓		画像の記録			✓	
	周辺機器の取付け機構	I	✓		方位・距離 (型式: PGT-25BT)			✓	145 H
	その他機構部品	I	✓		空間分解能	PGT-50AT		✓	S/N: T231832792
	ケーブル接続	I	✓		ベネトレーション			✓	
	フローブの外観確認	I	✓		スベックル/コントラスト			✓	
清掃	装置内部/ファン	CL	CL		画像の記録			✓	104 H
	フィルタ	CL	CL		方位・距離 (型式: PGT-25BT)			✓	S/N: 99A121591
	カバー/操作パネル	CL	CL		空間分解能	PGT-50AT		✓	99A0112931
	タッチパネル	CL	CL		ベネトレーション			✓	1064
	観察用モニタ(GRT or LCD)	CL	CL		スベックル/コントラスト			✓	1064
	フローブ/フローバルタ/ゼリーホルダ	CL	CL		画像の記録			✓	1064
	ハットバック/倍速充電器/	CL	CL		方位・距離 (型式: PGT-50BTM)			✓	S/N: 1064
	フローブ切替器/参考番号ユニット	CL	CL		空間分解能			✓	S/N: 1064
	ケーブル・コード類	CL	CL		ベネトレーション			✓	1064
	白黒プリンタ 型式名(P43)	CL	CL		スベックル/コントラスト			✓	1064
	カラープリンタ 型式名(C9900)	CL	CL		画像の記録			✓	1064
	レコーダ 型式名()	CL	CL		方位・距離 (型式: PGT-50BTM)			✓	S/N: 1064
特記事項	総合点検確認済み				6 使用件数 60 件/月				
					超音波ファントム S/N: 温度 26 °C				
					測定器1 管理No or SerNo: 042-HR023				
					測定器2 管理No or SerNo: 042-HR023				
					マニピュラ 管理No or SerNo: 042-HR023				

記録・結果(V: 異常なし、C: 確認、CL: 清掃、I: 目視点検、A: 調整、R: 交換、N: 特記事項参照、/ : 適用外)

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センター内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925			
お客様ID 61158290000-112	受付番号 4951549	作業 CS	区分 2H	保証区分	PJ番号 MC4090270101

装置名 SSA-790A (1)	設置室 ■⑦超音波センター	据付日 2011年1月24日
---------------------	------------------	-------------------

ご依頼内容 点検残務		受付日 2019年9月26日		作業内容 点検残務 定期交換部品交換実施 X27に200	
作業開始・終了時間					
開始	2019年9月26日16時00分				
終了	2019年9月26日16時30分				
時間内	時間外	往復	合計		
0.5	0	1	1.5		
					完了

ユニット SSA-790A	製造番号 99J10Z6107	作業担当者 木下 俊文 他0名
------------------	--------------------	--------------------

使用部品				数量
1	JELLY-HOLDER	図番	3M08-32110*A	1
2	PROBE-HOLDER	図番	3M08-32115*A	6
3	PSW02+BALL	図番	BSM34-1630-03*C	1
4		図番		
5		図番		

ご所属

ご署名

検査

丹羽知子

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	01093281
------	----------

Canon

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業（納品）を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名またはご捺印をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		サービスセンタ名 (TEL) 岡山サービスセンタ 086-292-6911	
様		キヤノンメディカルシステムズ Business Partner 株式会社 ヒューマンウェイブ	
お客様ID 6 1 1 5 8 2 9 0 0 0 0 - 1 1 2	受付番号 4 9 2 6 2 3 6	作業区分 C \$ 2 H	保証区分 保守契約
PJ番号 4 0 9 0 2 7 0 1 0 1			
装置名 SSA-790A	設置室 ■⑦超音波センター	受付日 2011年01月24日	
ご依頼内容 受付日 2019年08月01日		作業内容	
保守点検2019年09月/定期点検2019年09月		定期点検マニュアル(2Y730-022JA)に基づき 保守点検作業を実施しました。 詳細は別紙定期点検報告書に記載しています。	
作業開始・終了日時			
開始	2019年09月25日 16時00分		
終了	2019年09月25日 18時00分		
時間内	時間外	往復	合計
00時50分	0005分	0015分	00035分
ユニット SSA-790A		製造番号 99J10Z6107	作業担当者 HW 岸上寛介 他〇名
使用部品			数量
1		図番	
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

岸上 知子

お客様へ（留意事項のご説明）

- ※本作業（納品）に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法令により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報（以下「お客様情報」といいます）につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品（作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品）につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号

(A：お客様控え)

HITACHI

◎日立ヘルスケアシステムズ株式会社

ヘルスケア岡山営業所
岡山市北区東古松3丁目12-2両備グ
レースマンション医大西1階

TEL:050-3188-2330 FAX:086-234-2211

お客様名		岡山大学病院										御中		ヘルスケア岡山営業所 岡山市北区東古松3丁目12-2両備グ レースマンション区大西1階 TEL:050-3188-2330 FAX:086-234-2211								
住所		岡山市北区鹿田町2-5-1						受付No.		F517-1909-2048												
装置名				室名/製造番号						納入日		保証		保守契約		システムナンバー						
SSD-F75				検査室/200J3426						2011年03月31日		外		無		X70002-UA33-12						
作業日				開始時刻			終了時刻			作業時間		移動時間		作業者								
2019		年	09	月	18	日	15	時	15	分	18	時	15	分	2	.	0	1	.	0	佐藤 清隆	
		年		月		日		時		分		時		分		.			.			
		年		月		日		時		分		時		分		.			.			

作業内容

①顧客報告事項:保守点検を実施しました。
詳細は別紙点検報告書をご覧ください。
点検済証貼り付け。

使用測定器	VOAC21	(49-20202)	()	
品名・形式(資産・備品No)	HIOKI3454-11	(49-20224)	()	
または			()	
図書No.Rev.(試験項目・結果)	漏れ電流試験器 ST554	(34-63291)	()	
	MN2-2057 Rev.0	(良)	()	

今回の費用は 保守契約の範囲内です

なお、上記作業(点検・修理・交換他)

により交換した旧部品等は、(株)日立製作所が無償にて引き取らせて頂きます。

ご承認

完了区分

上記作業動作確認異常なし

渡回修久

完了

【合格】

[illegible]

平素、弊社格別のお引き立てを受け賜り誠にありがとうございます。
御愛用頂いております上記製品の安定した画像、機能、性能を維持し、
安心してお使いいただくために、
次のような特典を有した保守代行契約をおすすめいたします。

安心

専門スタッフによる安心サポート

- ・安全点検
- ・迅速なサポート

安定

- ・制御・機械系の点検調査
- ・消耗部品の定期交換

信題

医療機関・医療への信頼

HITACHI
Inspire the Next

コールセンタのご案内

ご利用の際は、下記システムナンバーをお知らせください

X70002-UA33-12

電話受付窓口（24時間年中無休）
フリーダイヤル
0120-889-825