

Verio (Dot/Dot Upgr)

MR

定期点検報告書(予防点検/安全点検)

顧客名： 国立大学法人岡山大学病院 様

装置名： MAGNETOM Verio

ID : 732-40018020-MR04

シリアル番号： 40607

点検回数： 年 4 回

作業表 No.	728200910251	作業実施日：	2020年 3月 9日
作業表 No.		作業実施日：	
作業表 No.		作業実施日：	
作業表 No.		作業実施日：	

お客様のご検収は作業票にお願い致します。

Kinekawa
Hiroya

点検は点検手順書 M6-040.831.05.03.02/M6-040.833.05.06.02 に基づき実施されます。
本報告書の内容は事前に通知の上変更されることがあります。

点検報告書

作業内容

点検回数 : 年4回 - 第1回	作業実施日 : 2020年3月9日	報告書番号 : 1
作業実施報告者 : 多胡 大地		
作業結果 : 安全点検の項目を実施致しました。装置に異常ございません。		
LHe77.5% 50KL 42.3K 50KB 44.4K CHT 39.5K 15.3psiA PHAP 0.80W ERDU battery 24.68V 二次冷水圧力S4.8bar R1.0bar F-70 21-22bar DB 76%→2%		
・各種動作試験(クエンチボタン動作、接地抵抗値測定等)を実施致しました。		
・データベースの再構築を実施致しました。データベース使用量:76%→2%		
・システムのフルバックアップ(COBR)を専用の外付HDDに作成致しました。		

点検回数 : 年4回 - 第2回	作業実施日 :	報告書番号 :
作業実施報告者 :		
作業結果 :		

点検回数 : 年4回 - 第3回	作業実施日 :	報告書番号 :
作業実施報告者 :		
作業結果 :		

点検回数 : 年4回 - 第4回	作業実施日 :	報告書番号 :
作業実施報告者 :		
作業結果 :		

2019年12月9日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Verio	作業番号	728200910258 / 1
シリアル番号	40607	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108274	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR04	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】 定期点検 第4回 (年4回)</p> <p>LHe : 77.5%, シールド温度 : 42.3K/43.7K/39.5K, 内圧 : 15.3psiA コンプレッサガス圧 : 21-22bar, 水圧(Ret./Sup.) : 1.0bar/4.7bar</p> <p>【作業内容/推定・特定した原因】 点検手順書に従い、定期点検作業を実施致しました。詳細は後日送付の点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認致しました。</p> <p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アップデート(MR009/19/R、MR005/19/R)を実施致しました。詳細は別紙の作業表をご参照ください。 ・6番コネクタの認識が悪い件、HeadMatrixとHead32のコネクタ清掃を実施しております。 ・朝の起動に失敗する件、恐れ入りますがログの取得とコールセンターへのご連絡をお願い致します。

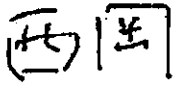
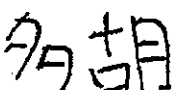
作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/12/09	多胡 大地	71001511	21:30	4.00	0.00	4.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンラインサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p></p> <p>2019年12月9日</p>	<p>弊社確認</p> <p></p> <p>多胡 大地 2019年12月9日</p>
--	--

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

2019 年 9 月 17 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Verio	作業番号	728200910250 / 1
シリアル番号	40607	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108274	作業状況	完了
UID番号	732-40018020-MR04	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】 定期点検 第3回 (年4回)</p> <p>LHe : 77.5%, シールド温度 : 42.3K/43.7K/39.5K, 内圧 : 15.3psiA コンプレッサガス圧 : 21-22bar, 水圧(Ret./Sup.) : 1.0bar/4.7bar</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】 点検手順書に従い、定期点検作業を実施致しました。詳細は後日送付の点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認致しました。</p> <p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種パーツ(RFPAフィルタ、停電時磁場停止用バッテリー)を交換致しました。 ・SkyraにてBody18を2番コネクタに接続する際にcoil file errorが発生する件、現象を確認致しました。 <p>シリアル2360のみで現象が出ております。原因切り分けのため、もう1枚のBody18をご使用頂きますようお願い致します。</p>

作業報告書

2019 年 6 月 4 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Verio	作業番号	728200910252 / 5
シリアル番号	40607	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108274	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR04	契約区分	契約あり
		報告者	多胡 大地

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>定期点検 第2回 (年4回)</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書に従い、定期点検作業を実施しました。 詳細につきましては後日送付の点検報告書をご参照ください。 作業終了後、システムOFF/ON、テストスキャンを実施し装置が正常稼働していることを確認しました。 LHe : 77.7%, シールド温度 : 42.3K/44.4K/39.5K, 内圧 : 15.3psiA コンプレッサガス圧 : 21-22bar, 水圧(Ret./Sup.) : 1.1bar/4.9bar</p> <p>【特記事項】</p> <p>①有資格者によるチラー定期点検を実施しました。動作異常無と報告を受けております。 ②1次冷却水回路、2次冷却水回路のフィルタを脱着清掃しました。 ③コンソールのフルバックアップ(COBR)を作成しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/06/03	多胡 大地	71001511	18:00	7.00	0.00	7.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

*保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p>吉 富</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387