

2020年3月19日

国立大学法人岡山大学病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Magnetom Aera	作業番号	728200878726 / 1
シリアル番号	152066	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193968	作業状況	未完
技術ID番号	732-40018020-MR07	契約区分	契約あり
		報告者	多田 賢矢

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】 定期点検 年4回 第1回 (予防点検) 尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】 点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。</p> <p>【点検特記事項】 -以下特記事項記載の対応を実施致しました-</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。 ・冷凍機用吸着器(アドソーバー)の定期交換を実施致しました。交換後、冷凍機の動作良好です。 ・水回路フィルタを清掃致しました。清掃後、動作良好です。 ・酸素濃度計のセンサーが交換時期になりましたので、交換致しました。交換後、動作良好です。 <p>点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2020/03/19	多田 賢矢	71002216	17:30	6.50	0.00	6.50	

使用部品・経費

品名	部品コード	数量	請求区分
酸素モニター JKR-25	100187797	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンラインサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p>松下</p>	<p>弊社確認</p> <p>多田</p> <p>多田 賢矢 2020年3月19日</p>
-------------------------	---------------------------------------------------

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019年12月23日

国立大学法人岡山大学病院

御中

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	MAGNETOM Aera	作業番号	728200878725
装置シリアル番号	152066	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193968	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR07	契約区分	契約内
		報告者	杵川 博哉

サービス・作業内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

定期点検 年4回 第4回 (安全点検)
尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い安全点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。
【点検特記事項】-以下特記事項記載の対応を実施致しました-
・チラーメーカーによる、チラーの点検が行われ異常無いとの事です。
・UI:MR005/19/R SD08 WindowsOSのセキュリティアップデートを行いました。
・UI:MR027/19/R 冷却水自動加圧タンクの動作チェックを行いました。問題ありません。
・内蔵ボディオイルの周波数マッチングにズレがありました。機械的に調整し規定値範囲に収まっています。
また検査室の温湿度計が初期化されておりましたので改めて記録モードにしております。
・マグネット停止ボタン(ERDU)の動作テストを実施致しました。動作良好です。
点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/12/23	杵川 博哉	71026753	17:30	8.50		8.50	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	弊社確認
松下	杵川
2019年12月24日	2019年12月24日

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019 年 9 月 30 日

国立大学法人岡山大学病院

御中

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	MAGNETOM Aera	作業番号	728200878724
装置シリアル番号	152066	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193968	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR07	契約区分	契約内
		報告者	川島 淳

サービス・作業内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

定期点検 年 4 回 第 3 回 (予防点検)
尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。

【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。
【点検特記事項】-以下特記事項記載の対応を実施致しました-
・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。
・患者寝台上下動用ポンプのオイルを補充致しました。作業後、動作良好です。
・ガントリー上部のモニターに縦状のドット抜けがございます。後日の対応を予定致します。

点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

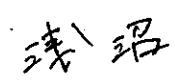
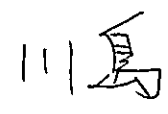
作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/09/30	川島 淳	71000133	18:00	5.75	0.00	5.75	

使用部品・経費

品名	部品コード	数量	請求区分

*保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	弊社確認
 2019年9月30日	 川島 淳 2019年9月30日

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019 年 6 月 26 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Magnetom Aera	作業番号	728200878723 / 1
シリアル番号	152066	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-193968	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-MR07	契約区分	契約あり
		報告者	大嶋 剛史

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>定期点検 2回目/年4回 予防点検回</p> <p>【本作業後、作業内容についての電話アンケートをいただく事が有ります。その際は、お手数ですがご協力をよろしくお願ひします】</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書に従い定期点検(予防点検)を実施致しました。以下特記事項記載の対応を実施させて頂きました。その他、異常箇所は御座いませんでした。 尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させて頂きます。</p> <p>He74.6% 50KL 45.8K 50KB 45.8K CHT 38.2K MP 15.3psiA PHAP 1.02W ERDU battery 23.09V Compressor22.0bar 二次水圧return 1.08bar</p> <p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チラーメーカーによる、チラーの点検が行われ異常無いとの事です。 ・松下様の同意の元、全ての画像の消去を伴うデータベースの再構築を行い、動作は正常です。 ・検査室空調のハニカムフィルターを清掃いたしました。 ・AWP (メインコンピューター) のイメージバックアップを作成しました。 ・Headコイルの差し込み口の清掃を行っています。 <p>作業後の装置の起動及びファントムによるテストスキャンは正常です。</p>