

結果・処置記号					
良	V	清掃	W	交換	P
不良	F	調整	A	修理要	R

心電計

ECG-2450/2460

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院	設置場所 CLR	御住所(TEL)
型式 ECG-2450	本体No. 158	Rev. AA
納入 ____年__月__日		御担当 ____

項目	番号	点検項目	結果	処置	項目	番号	点検項目	結果	処置		
外観	1	装置外装に、破損・汚れはないか	✓		26	タッチパネルは正常か		✓			
	2	表示画面の清掃は行ったか	✓		27	LCDカラーパターンは正常か		✓			
	3	スイッチの感触は良いか	✓		28	LED表示は正常か		✓			
レコーダ	4	マガジンロック機構は正常か	✓		29	操作パネルのキーは正常に動作するか		✓			
	5	プラテンローラの清掃は行ったか	✓		30	スピーカは正常か		✓			
	6	サーマルヘッドの清掃は行ったか	✓		31	心電図表示は正常か		✓			
	7	紙切れ検出センサの清掃は行ったか	✓		32	印字品質は良好か		✓			
	8	マーク検出センサの清掃は行ったか	✓		33	基線幅は規格内か		✓			
	9	マガジン検出スイッチは正常か	✓		34	ドット抜けはないか		✓			
動作確認	10	電源スイッチをONにして、正常に立ち上がるか	✓		日常点検	記録速度テスト(各速度で100mm記録:100mm±2%以内)					
	11	日付・時刻は正確か	✓			5mm/s	98~102mm	100	mm		
	12	記録紙切れ検出機能は正常か	✓			10mm/s	98~102mm	100	mm		
	13	感度は規格内か		✓			12.5mm/s	98~102mm	100	mm	
		I誘導	9.8 ~ 10.2mm				(10.0)	mm	25mm/s	98~102mm	101
		II誘導	19.6 ~ 20.4mm		(20.0)		mm	50mm/s	98~100mm	100	mm
		III誘導	9.8 ~ 10.2mm		(10.0)		mm	36	装置内部の記憶装置は正常か		✓
		aVR	14.7 ~ 15.3mm		(15.0)		mm	37	SDカードの読み書きは正常か		✓
		aVL	0 ~ 1mm		(0.0)		mm	38	フルキーボードの操作は正常か(オプション)		/
		aVF	14.7 ~ 15.3mm		(15.0)		mm	39	磁気カードリーダーは正常か(オプション)		/
		V1	9.8 ~ 10.2mm		(10.0)		mm	40	バーコードリーダーは正常か(オプション)		✓
	V2	9.8 ~ 10.2mm	(10.0)	mm	41	シリアル通信は正常か		/			
	V3	9.8 ~ 10.2mm	(10.0)	mm	42	ネットワーク接続状態は良好か		/			
	V4	9.8 ~ 10.2mm	(10.0)	mm	43	外部信号入出力は正常か		/			
V5	9.8 ~ 10.2mm	(10.0)	mm	接地漏れ電流							
V6	9.8 ~ 10.2mm	(10.0)	mm	正常状態	0.5mA以下	(0.06)	mA	✓			
14	オート記録はできるか	✓		単一故障状態	1mA以下	(0.12)	mA	✓			
15	マニュアル記録はできるか	✓		接触電流(外装-大地)							
16	紙送りキーは正常か	✓		正常状態	100μA以下	(1)	μA	✓			
17	記録紙の蛇行は無い	✓		単一故障状態	500μA以下	(61)	μA	✓			
18	電極リード線は正常か	✓		患者漏れ電流							
19	表示部LCDにキズやドットの抜けはないか	✓		正常状態	DC 10μA以下	(1)	μA	✓			
電源部	20	電源コードに異常は無い	✓		正常状態	AC 10μA以下	(2)	μA	✓		
	21	保護接地線の確認	✓		単一故障状態	DC 50μA以下	(1)	μA	✓		
	22	バッテリーは正しく接続されているか	✓		単一故障状態	AC 50μA以下	(4)	μA	✓		
使用期間の確認	23	バッテリーの使用期限(1年間)は過ぎていないか バッテリーの使用開始日 (2019.4.24)	✓								
	24	記録紙走行距離(サーマルヘッドの走行距離)は30,000(m)以内か (160 m)	✓								
	25	モータ使用時間は3,000(h)以内か (1 h)	✓								

計測器用	品名	管理No(製造No)	使用期限	品名	管理No(製造No)	使用期限
	AX-410G	PA-2271	2020-8			
	100-1101	14CA0119	2020-7			

構成機器	付属品・消耗品
	品名 数量
御申し出事項	
定期点検	
処理事項	
点検表に基づく点検実施。	
未処理事項	

総合判定	特記事項
<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし。このままご使用ください。 <input type="checkbox"/> 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください <input type="checkbox"/> 使用上問題がありますので、緊急に修理してください	バ-722-01-03

点検日	作業時間	作業者	承認
2020年6月17日	始 16時00分 終 16時45分	堀 謙太郎	

会社名 日本光電工業株式会社 住所 岡山県岡山市北区田中岡山県岡山市北区田中613-11	緊急連絡先 0120-49-0990
---	-----------------------