

結果・処置記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

脳波計
EEG-1200/1214/1218/1224/1260/1274/1278/1284/1290

2/2

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院		設置場所 2階管理検査室		型式 EEG-1218	本体No. 41	Rev. AA	
部位	点検項目	結果	処置	部位	点検項目	結果	処置
安全性 (第2版)	EEG-1200: ~ 00773, EEG-1214: ~ 01885 EEG-1218: ~ 00838, EEG-1224: ~ 00146			安全性 (第3版)	EEG-1200: 00774 ~, EEG-1214: 01886 ~ EEG-1218: 00839 ~, EEG-1224: 00147 ~ EEG-1260: 00001 ~, EEG-1274: 00001 ~ EEG-1278: 00001 ~, EEG-1284: 00001 ~ EEG-1290: 00001 ~		
	接地漏れ電流				接地漏れ電流		
	正常状態(500μA以下) (/ μA) ✓				正常状態(5mA以下) (mA) /		
	単一故障状態(1mA以下) 0.00/ mA) ✓				単一故障状態(10mA以下) (mA) /		
	外装漏れ電流				接触電流(外装-大地)		
	正常状態(100μA以下) (/ μA) ✓				正常状態(100μA以下) (μA) /		
	単一故障状態(500μA以下) (2 μA) ✓				単一故障状態(500μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形		
	正常状態DC(10μA以下) (/ μA) ✓				正常状態DC(10μA以下) (μA) /		
	正常状態AC(100μA以下) (/ μA) ✓				正常状態AC(100μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形		
	単一故障状態DC(50μA以下) (/ μA) ✓				単一故障状態DC(50μA以下) (μA) /		
	単一故障状態AC(500μA以下) (/ μA) ✓				単一故障状態AC(500μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I CF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) CF形		
	正常状態DC(10μA以下) (7 μA) ✓				正常状態DC(10μA以下) (μA) /		
正常状態AC(10μA以下) (7 μA) ✓			正常状態AC(10μA以下) (μA) /				
患者漏れ電流 I CF形			患者漏れ電流(患者接触部-大地) CF形				
単一故障状態DC(50μA以下) (7 μA) ✓			単一故障状態DC(50μA以下) (μA) /				
単一故障状態AC(50μA以下) (7 μA) ✓			単一故障状態AC(50μA以下) (μA) /				
使用計測器	品名	管理No(製造No)	使用期限	品名	管理No(製造No)	使用期限	
	LCC-1101	14CA0119	2020.7	PSG-1000	BB-2524	2020.8	
	AX-500B	BB-512	2020.6				
	57CT0078	57CT0078	2021.2				
構成機器			付属品・消耗品				
CC-120A(224)・VL-121A(21)・LS-303A PE-120A(55)・SC-0716(238)・SC-0716(238)・SC-0716(238) UPS(ADCSmartUPS750)			品名 数量 内部電池 1				
御申し出事項			付録品・消耗品				
スポット点検			品名 数量				
処理事項			数量				
1. 動作確認 2. 清掃 3. 内部電池交換			内部電池 1				
未処理事項			付録品・消耗品				
総合判定			付録品・消耗品				
☒ 異常なし。このままご使用ください。 ☐ 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください。 ☐ 使用上問題がありますので、緊急に修理してください。			特記事項 #E797・532N0R2 #E701・11069743502 IP: 192.168.150.52 Sub: 255.255.255.0 GW: 192.168.19.50 OPTIPLEX XE2				
点検日 2020.3.17		作業時間		作業者		承認	
2020年3月17日		始 16時00分 終 20時00分		鈴木健甫			
会社名 日本光電工業(株)			緊急連絡先 0120-49-0990				
住所 岡山県岡山市北区田中613-11							

0624-901681A(2019.07.11)

日本光電

結果・処置記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

脳波計
EEG-1200/1214/1218/1224/1260/1274/1278/1284/1290

2/2

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院		設置場所 脳波計検査室		型式 EEG-1218	本体No. 42	Rev. AA		
部位	点検項目	結果	処置	部位	点検項目	結果	処置	
安全性 (第2版)	EEG-1200: ~ 00773, EEG-1214: ~ 01885 EEG-1218: ~ 00838, EEG-1224: ~ 00146			安全性 (第3版)	EEG-1200: 00774 ~, EEG-1214: 01886 ~ EEG-1218: 00839 ~, EEG-1224: 00147 ~ EEG-1260: 00001 ~, EEG-1274: 00001 ~ EEG-1278: 00001 ~, EEG-1284: 00001 ~ EEG-1290: 00001 ~			
	接地漏れ電流				接地漏れ電流			
	正常状態(500μA以下) (2 μA) ✓				正常状態(5mA以下) (mA) /			
	単一故障状態(1mA以下) (0.002 mA) ✓				単一故障状態(10mA以下) (mA) /			
	外装漏れ電流				接触電流(外装-大地)			
	正常状態(100μA以下) (1 μA) ✓				正常状態(100μA以下) (μA) /			
	単一故障状態(500μA以下) (2 μA) ✓				単一故障状態(500μA以下) (μA) /			
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形			
	正常状態DC(10μA以下) (1 μA) ✓				正常状態DC(10μA以下) (μA) /			
	正常状態AC(100μA以下) (1 μA) ✓				正常状態AC(100μA以下) (μA) /			
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形			
	正常状態DC(50μA以下) (1 μA) ✓				正常状態DC(50μA以下) (μA) /			
	単一故障状態AC(500μA以下) (2 μA) ✓				単一故障状態AC(500μA以下) (μA) /			
	患者漏れ電流 I CF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形			
	正常状態DC(10μA以下) (μA) /				正常状態DC(10μA以下) (μA) /			
	正常状態AC(10μA以下) (μA) /				正常状態AC(10μA以下) (μA) /			
	使用計測器	品名	管理No(製造No)		使用期限	品名	管理No(製造No)	使用期限
		LC-1101	14CA0119		2020.7	PSG BD-1000	BR-2529	2020.8
AX-500B		BR-512	2020.6					
AX-410G		BA-0156	2020.11					
1940		57CT0078	2021.2					
	TPS1002B	32CA0019	2020.7					
構成機器 CC-120A(222), VL-121A(26), PE-120A(54), ZD-110A(332) ① 1201A(373), 11-2-F11-A, SC-0116(239), VPS (APC Smart UPS 750) LS-703A(91779)				付属品・消耗品				
御申し出事項				品名			数量	
スポット点検				X209			1	
処理事項 計測表に基づき点検の実施。内部電池の交換。								
未処理事項				特記事項 H.E.T.777: 534LOR2 OPTIPLEX XE2 INTER-STAT: 11073009422 Ver.05-04 IP: 192.168.150.51 2020.3.10 鈴木修 確認 NMB (=2.57mm:4) Sub: 255.255.255.0 → Ver.07-30 Gw: 192.168.150.254				
総合判定 ☒ 異常なし。このままご使用ください。 ☐ 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください。 ☐ 使用上問題がありますので、緊急に修理してください。 2020.3.10 鈴木修								
点検日		作業時間		作業者		承認		
2020年3月10日		始 17時00分 終 20時00分		鈴木修				
会社名 日本光電工業(株)				緊急連絡先 0120-49-0990				
住所 岡山県岡山市北区田中613-11								

0624-901681A(2019.07.11)

日本光電

結果・処置記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

脳波計
EEG-1200/1214/1218/1224/1260/1274/1278/1284/1290

2/2

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院		設置場所 脳波計室③		型式 EEG-1218	本体No. 43	Rev. AA	
部位	点検項目	結果	処置	部位	点検項目	結果	処置
安全性 (第2版)	EEG-1200: ~ 00773, EEG-1214: ~ 01885 EEG-1218: ~ 00838, EEG-1224: ~ 00146			安全性 (第3版)	EEG-1200: 00774 ~, EEG-1214: 01886 ~ EEG-1218: 00839 ~, EEG-1224: 00147 ~ EEG-1260: 00001 ~, EEG-1274: 00001 ~ EEG-1278: 00001 ~, EEG-1284: 00001 ~ EEG-1290: 00001 ~		
	接地漏れ電流				接地漏れ電流		
	正常状態(500μA以下) (3 μA) V				正常状態(5mA以下) (mA) /		
	単一故障状態(1mA以下) (0.003 mA) V				単一故障状態(10mA以下) (mA) /		
	外装漏れ電流				接触電流(外装-大地)		
	正常状態(100μA以下) (1 μA) V				正常状態(100μA以下) (μA) /		
	単一故障状態(500μA以下) (3 μA) V				単一故障状態(500μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形		
	正常状態DC(10μA以下) (1 μA) V				正常状態DC(10μA以下) (μA) /		
	正常状態AC(100μA以下) (2 μA) V				正常状態AC(100μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I CF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形		
	正常状態DC(10μA以下) (μA) /				単一故障状態DC(50μA以下) (μA) /		
	正常状態AC(10μA以下) (μA) /				単一故障状態AC(500μA以下) (μA) /		
	患者漏れ電流 I CF形						
	単一故障状態DC(50μA以下) (μA) /						
単一故障状態AC(50μA以下) (μA) /							
使用計測器	品名	管理No(製造No)	使用期限	品名	管理No(製造No)	使用期限	
	AR-410G	BA-0156	2020.11				
	LCC-1101	14(A0119)	2020.7				
	PSG411	2020-8 13B-2574	2020.8				
	1940	52C70078	2021.2				
	TDG1002B	32C(A0017)	2020.7				
構成機器 EC-120A(225), PE-120A(56), VL-121A(28), LS-703A(88003) JE-911A(2137).				付属品・消耗品			
				品名	数量		
				内部電池	1		
御申し出事項							
スポット点検							
処理事項 1. 内部電池交換(02037) 3. 清掃 2. 動作点検							
未処理事項				特記事項 H-E 536POR 2 J-F: 11076455278 OPTILEX XE 2 IP: 192.168.140.53 Sub: 245.245.245.0 GW: 192.168.150.254 2020.3.18 鈴木健 FEEDバックの初め が完了して、交換して は修理を願います。 バージョン11と13番の 4-7カ所は7漏れを →交換(4-7) 修理済み。			
総合判定 ☒ 異常なし。このままご使用ください。 ☐ 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください。 ☐ 使用上問題がありますので、緊急に修理してください。							
点検日	作業時間		作業者	承認			
2020 年 3 月 18 日	始	18 時 00 分	鈴木健南				
	終	22 時 00 分					
会社名 日本光電工業(株)				緊急連絡先 0120-49-0990			
住所 岡山県岡山市北区田中613-11							

0624-901681A(2019.07.11)

日本光電

結果・処置・記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

脳波計
EEG-1200/1214/1218/1224/1260/1274/1278/1284/1290

2/2

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院		設置場所 総計 西2階生理検査		型式 EEG-1214	本体No. 1940	Rev. BH		
部位	点検項目	結果	処置	部位	点検項目	結果	処置	
安全性 (第2版)	EEG-1200: ~ 00773, EEG-1214: ~ 01885 EEG-1218: ~ 00838, EEG-1224: ~ 00146			安全性 (第3版)	EEG-1200: 00774 ~、EEG-1214: 01886 ~ EEG-1218: 00839 ~、EEG-1224: 00147 ~ EEG-1260: 00001 ~、EEG-1274: 00001 ~ EEG-1278: 00001 ~、EEG-1284: 00001 ~ EEG-1290: 00001 ~			
	接地漏れ電流				接地漏れ電流			
	正常状態 (500 μ A以下)	(μ A)	✓		正常状態 (5mA以下)	(0.009 mA)	✓	
	単一故障状態 (1mA以下)	(mA)	✓		単一故障状態 (10mA以下)	(0.017 mA)	✓	
	外装漏れ電流				接触電流 (外装-大地)			
	正常状態 (100 μ A以下)	(μ A)	✓		正常状態 (100 μ A以下)	(1 μ A)	✓	
	単一故障状態 (500 μ A以下)	(μ A)	✓		単一故障状態 (500 μ A以下)	(9 μ A)	✓	
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流 (患者接触部-大地) BF形			
	正常状態DC (10 μ A以下)	(μ A)	✓		正常状態DC (10 μ A以下)	(2 μ A)	✓	
	正常状態AC (100 μ A以下)	(μ A)	✓		正常状態AC (100 μ A以下)	(4 μ A)	✓	
	患者漏れ電流 I CF形				患者漏れ電流 (患者接触部-大地) BF形			
	正常状態DC (10 μ A以下)	(μ A)	✓		単一故障状態DC (50 μ A以下)	(μ A)	✓	
	正常状態AC (10 μ A以下)	(μ A)	✓		単一故障状態AC (500 μ A以下)	(μ A)	✓	
	患者漏れ電流 I CF形							
	単一故障状態DC (50 μ A以下)	(μ A)	✓					
	単一故障状態AC (50 μ A以下)	(μ A)	✓					
	使用計測器	品名	管理No (製造No)		使用期限	品名	管理No (製造No)	使用期限
		1940	57CT0078		2021.2			
TDS1002B		32(A0019)	2020.7					
AX-410G		BA-0156	2020.11					
LC-1101		14CA0119	2020.7					
	ESG4.1	BR-2324	2020.8					
構成機器 PGS 2020.7.15 CC-120A PE-120A (2527) VL-120A (2242) JE-921A (15446)				付属品・消耗品				
				品名	数量			
				内部電池	1			
御申し出事項								
スポット点検								
処理事項 1. 内部電池交換 (CR2032) 3. 清掃 2. 動作5枚								
未処理事項				特記事項 OPTIPLEX #E7477: 8NG1MD2 +E75-1 18831930230 TP: 192 168.150.61 255.255.248.0 192.168.150.254 2020.3.16 鈴木修正 Ver.05-04				
総合判定 ☐ 異常なし。このままご使用ください。 ☐ 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください。 ☐ 使用上問題がありますので、緊急に修理してください。								
点検日	作業時間		作業者	承認				
2020年3月16日	始 16時00分 終 20時20分		鈴木悠甫・土屋謙太郎					
会社名	日本光電工業(株)		緊急連絡先 0120-49-0990					
住所	岡山県岡山市北区田中613-11							

0624-901681A(2019.07.11)

日本光電

結果・処置記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

脳波計
EEG-1200/1214/1218/1224/1260/1274/1278/1284/1290

2/2

点検記録表

発行No. _____

施設名 岡山大学病院		設置場所 生体検査室		型式 EEG-1214	本体No. 00185	Rev. AA																				
部位	点検項目	結果	処置	部位	点検項目	結果 処置																				
安全性 (第2版)	EEG-1200: ~ 00773, EEG-1214: ~ 01885 EEG-1218: ~ 00838, EEG-1224: ~ 00146			安全性 (第3版)	EEG-1200: 00774 ~, EEG-1214: 01886 ~ EEG-1218: 00839 ~, EEG-1224: 00147 ~ EEG-1260: 00001 ~, EEG-1274: 00001 ~ EEG-1278: 00001 ~, EEG-1284: 00001 ~ EEG-1290: 00001 ~																					
	接地漏れ電流				接地漏れ電流																					
	正常状態(500μA以下) (13 μA) V				正常状態(5mA以下) (mA)																					
	単一故障状態(1mA以下) (0.02 mA) V				単一故障状態(10mA以下) (mA)																					
	外装漏れ電流				接触電流(外装-大地)																					
	正常状態(100μA以下) (1 μA) V				正常状態(100μA以下) (μA)																					
	単一故障状態(500μA以下) (13 μA) V				単一故障状態(500μA以下) (μA)																					
	患者漏れ電流 I BF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形																					
	正常状態DC(10μA以下) (1 μA) V				正常状態DC(10μA以下) (μA)																					
	正常状態AC(100μA以下) (6 μA) V				正常状態AC(100μA以下) (μA)																					
	患者漏れ電流 I CF形				患者漏れ電流(患者接触部-大地) BF形																					
	正常状態DC(10μA以下) (1 μA) V				正常状態DC(50μA以下) (μA)																					
	正常状態AC(10μA以下) (6 μA) V				正常状態AC(500μA以下) (μA)																					
	患者漏れ電流 I CF形																									
	単一故障状態DC(50μA以下) (1 μA) V																									
	単一故障状態AC(50μA以下) (6 μA) V																									
	使用計測器	品名	管理No(製造No)		使用期限	品名	管理No(製造No)	使用期限																		
		AX-410G	BB-3061		2020.11																					
PGS		BB-2524	2020.8																							
1940		57CT0078	2021.2																							
構成機器				付属品・消耗品																						
VL-120A(2N00178) JE-921A(2N02138) CC-120A(2N04547) ZD-110A(2N00331)				<table border="1"> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			品名	数量																		
品名	数量																									
御申し出事項																										
スポット点検																										
処理事項																										
1. 内部電池交換(CR2032) 2. 清掃 3. Bios再設定 4. 動作点検																										
未処理事項				特記事項																						
キ-ボ-ドのB/Sキーが効きが悪い。				OPTIPLEX XE2 サ-ビス77" 3RG0B22 サ-ビス77" 8191035002 ID: 192.168.150.56 S/M: 255.255.255.0 P/G: 192.168.150.254																						
総合判定																										
☒ 異常なし。このままご使用ください。 ☐ 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理してください。 ☐ 使用上問題がありますので、緊急に修理してください。																										
点検日		作業時間		作業者		承認																				
2020年 3月 13日		始 12時 30分 終 16時 00分		吉代克治																						
会社名				緊急連絡先																						
日本光電工業(株)				0120-49-0990																						
住所																										
岡山県岡山市北区田中613-11																										

0624-901681A(2019.07.11)

日本光電